

# HAARENTFERNUNG



## Shave no more

Haben Sie genug vom ständigen Rasieren und Wachsen?

Powerlite600<sup>®</sup> stellt eine revolutionäre Entwicklung im Bereich der Haarentfernungssysteme dar. Durch die Powerlite-Methode wird überflüssiges Haar in zeitsparenden Behandlungen dauerhaft und schmerzfrei entfernt, ohne die Haut zu gefährden.

Powerlite600<sup>®</sup> hat die Phasen der Forschung, Produktentwicklung, Produkttest und Nachbearbeitung stets in enger Zusammenarbeit mit Kosmetikern und Dermatologen durchlaufen.

## Funktion von Powerlite600<sup>®</sup> und der Powerlite-Methode


Die Powerlite-Methode basiert auf intensiven Lichtimpulsen. Das unschädliche Licht wird von dem im Haarfollikel enthaltenen Melanin absorbiert und dadurch in Wärme umgewandelt. Bei einer Temperatur von 70°C wird das Protein in den Haarfollikeln, die sich gerade in der Wachstumsphase befinden, irreversibel zerstört. Danach kann sich kein neues Haar mehr bilden.

## Alle Körperstellen


Die Behandlung ist bei den meisten Haar- und Hauttypen möglich. Generell gilt, je dunkler das Haar und je heller die Haut, desto schneller erreicht man das gewünschte Ergebnis und desto besser ist es. Die Powerlite-Methode ist nicht auf bestimmte Körperpartien beschränkt, sondern kann im Gesichtsbereich ebenso gut wie an allen anderen Bereichen des Körpers eingesetzt werden.

**POWERLITE | 600<sup>®</sup>**


Die Abbildungen und Fotos zeigen, wie ein Haarfollikel in der Anagen-Phase auf die Behandlung mit Powerlite600® reagiert und wie die Behandlungsergebnisse mit Powerlite600® aussehen.

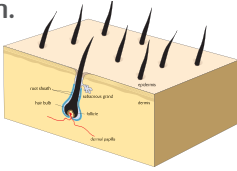


Haarfollikel in der Anagen-Phase

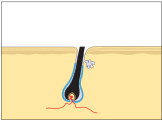


Schritt 1: Die zu behandelnde Fläche wird rasiert

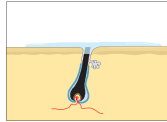


Schritt 2: Aqua Charge Gel wird aufgetragen

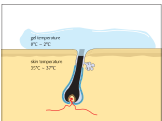


Schritt 3: Das Kühlgel wird aufgetragen

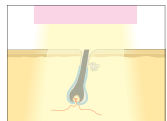


Schritt 4: Beginn der Behandlung mit Powerlite600®

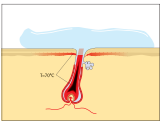

Schritt 5: Anstieg der Temperatur

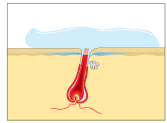


Schritt 6: Die oberste Hautschicht wird durch das Gel gekühlt

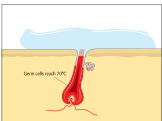


Schritt 7: Die Temperatur im Haarfollikel erreicht 70°C




Schritt 8: Die Proteine denaturieren (das Protein in den Haarzellen und Haarfollikeln wird zerstört)

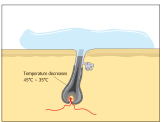

Schritt 9: Der aktive Haarfollikel stirbt ab

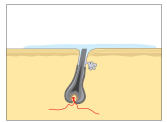

Schritt 10: Conditioning Up Essence wird aufgetragen

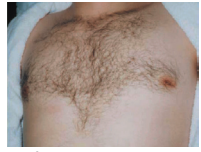

Vorher



Nach drei Behandlungen



Vorher



Nach zwei Behandlungen



Vorher



Nach drei Behandlungen

Hergestellt in Schweden

Powerlite600® wird in Schweden produziert. Powerlite600® wurde in enger Zusammenarbeit mit schwedischen und japanischen Ingenieuren und Ärzten entwickelt.



CE

Das CE-Kennzeichen ist die Garantie dafür, dass alle EG-Richtlinien für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und Produktionsablauf eingehalten wurden.



ISO 13485:2003

PreSwede AB wurde zertifiziert für die medizinischen Qualitäts-Standards der ISO 13485:2003. Das Unternehmen verfolgt eine entschlossene und gut dokumentierte Arbeitsweise in allen Bereichen, die die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen beeinflussen können.